


Інструкція з використання

Діти повинні перебувати під належним наглядом під час використання тренажера.
Щоб отримати повніші вказівки, зверніться до Act+Fast навчального посібника.


Кожен набір містить 10 зелених поролонових заглушок для початківців і 20 жовтих поролонових заглушок для більш просунутих учнів.

Поролонові пробки можна розм'якшити, прокатавши пальцями. Це дозволить легше виштовхувати їх із тренажера, виконувати за необхідності.

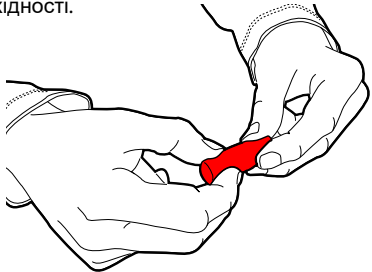


Одягніть жилет через голову та відрегулюйте плечеві ремені та пояс, щоб вони щільно прилягали до тіла

Помістіть поролонову пробку в отвір дихальних шляхів.

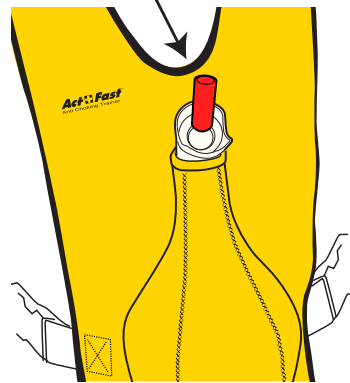

Розміри цих заглушок є типовими від яких **МОЖНА ВДАВИТИСЬ** - забезпечують реалістичне навчання, але їх слід тримати в недоступному місці для дітей віком до 4 років.

Покладіть руки правильно склавши їх між пупком і грудною кліткою, злегка притиснувши їх до жилету

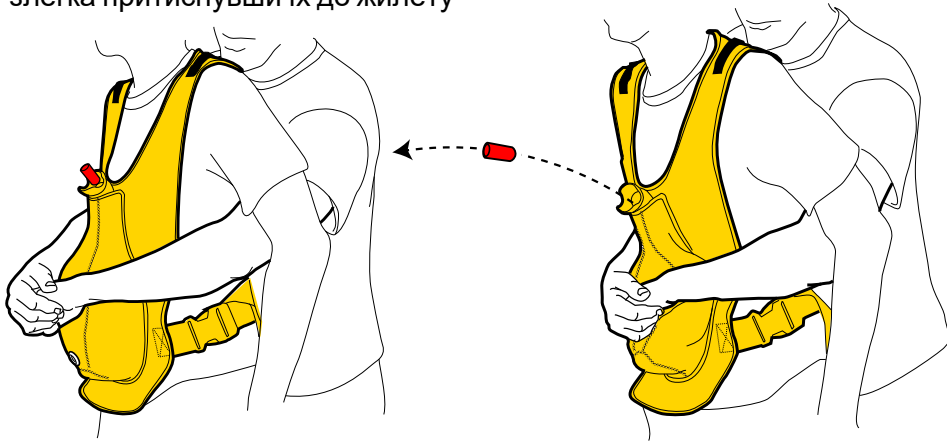

Потім зробіть швидкий поштовх угору, щоб усунути перешкоду. Не застосовуйте силу, це не є необхідним і може призвести до травм. Правильна техніка призведе до того, що пробка вилетить у повітря, забезпечуючи миттєву візуалізацію і навчить техніці виконання прийому.

УВАГА: Уникайте направлення заглушки в сторону очей.

Використовуйте Back Slap Pad щоб потренуватися наносити удари по спині.

УВАГА: Не застосовуйте силу, лише для симуляцій.




Додаткова накладка Back Slap Pad (для удару по спині) входить у комплект. Просто зніміть прикріплену липучку Act+Fast патч на тильній стороні жилета та замініть на Back Slap Pad.

Тренувальний жилет можна використовувати в різних положеннях для відпрацювання реалістичного сценарія, зокрема: стоячи, сидячи та лежачи на землі. Крім того, це дозволяє учню практикувати саморятування, використовуючи стільницю або стілець.

Інструкція по очистці

З нижньої сторони жилета розстібніть липку стрічку та зніміть з непоренового жилета повітряний пузир з ПВХ і вузол дихальних шляхів.

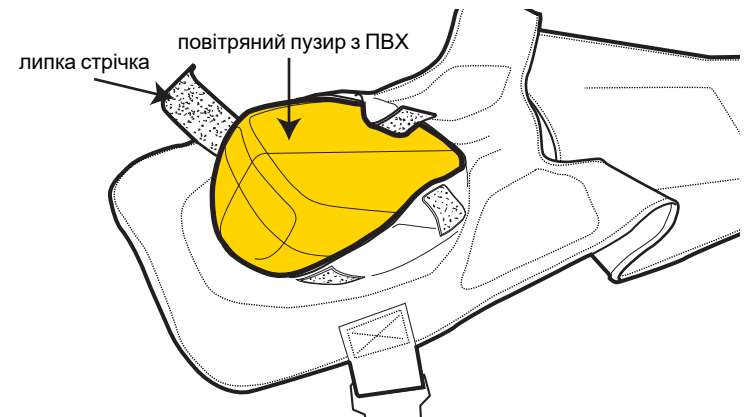

Прати вручну з використанням неагресивних миючих сил, розвісьте сушити на повітрі